

「フォグレスケアフリーコート」 ご使用上の注意点


警告 必ずお守りください



通常のコートと比べると優れたくもり低減性能をもっていますが、温度や湿度などの環境によってはくもることがあります。

レンズがくもった状態でのご使用は危険ですのでご注意ください。

レンズ表面が乾燥すればくもり低減効果は復活します。

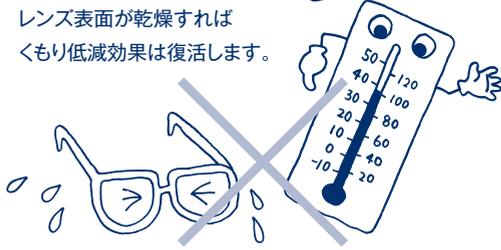

反射防止コートはありませんので、レンズの表面・裏面のぎらつきが気になることがあります。

暗い場所での運転時に、街灯やヘッドライトがレンズに映りこむことがありますのでご注意ください。



くもり止め効果があるクロスや液剤、薬品類は使用しないでください。

「フォグレスケアフリーコート」のくもり低減性能が低下することがあります。



次亜塩素酸水を使用しないでください。

「フォグレスケアフリーコート」が破損、はく離することがあります。

快適に、そして安全にお使いいただくために

フォグレスケアフリーコート

取扱説明書

安全上のご注意

● 表示とその意味 ●

警告	誤った取扱をした時に、重傷、失明など重大な結果になる可能性があることを示しています。
注意	誤った取扱をした時に、障害を負う可能性や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	一般的な注意が必要なことを示しています。
禁止	特定の行為の禁止を表します。

メガネのご相談窓口

弊社のレンズについてのご相談は、ご購入店または下記のご相談窓口までお問い合わせください。

【製造販売元】セイコー オプティカル プロダクツ 株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-10

お客様相談室 TEL : 03-6747-2020

<https://www.seiko-opt.co.jp/>



目とメガネの総合情報サイト

「目のケア情報やメガネ」の役立つ話を毎月メールでお届けしています。

<https://www.kaiteki-eye.jp/>

登録簡単！入会金も年会費も無料です。

2021年4月作成


このたびは、弊社のレンズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読み下さい。小さなお子さまには、保護者が読んでご使用上の注意がわかるようにご説明ください。また、この取扱説明書は、お手元に大切に保管してください。なお、レンズの基本的なお取り扱い方法については、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

「フォグレスケアフリーコート」 のお手入れについて

お手入れの方法

レンズに汚れや水分が付着したときは、下記の方法でお手入れしてください。

レンズ表面の汚れ、ホコリを水で軽く洗い、柔らかいティッシュペーパーで軽く押し拭きをして水分を取った後、メガネクロスでやさしく拭き、お手入れしてください。

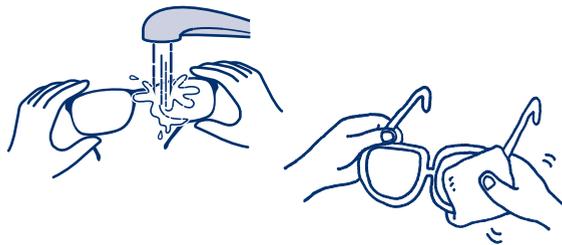

「フォグレスケアフリーコート」の特長

「フォグレスケアフリーコート」は、メンテナンスフリーのくもりにくいレンズです。レンズの両面にくもりを抑制する特殊なコーティングを施しており、優れたくもり低減性能を発揮します。

くもりを防止する専用のクロスや液剤を塗布しなくても、くもり低減性能を発揮、お手入れが簡単です。

また、レンズ表面の拭き取りやすさも特長です。

レンズに水分が付着した状態ではメガネクロスが滑りにくく拭きにくいので、水分を除去した上で拭いてください。汚れやホコリがひどいときに水洗いせずに乾拭きしますと、キズの原因になります。



「フォグレスケアフリーコート」 ご使用上の注意点

注意 必ずお守りください



氷点下以下の環境の場合、凍結によるくもりが発生することがあります。

また、高湿度な環境でご使用の場合や、メガネ全体を覆うタイプのゴーグルや花粉対策用のフレーム等をご使用の場合は、結露によるくもりが発生することがあります。



くもり低減効果は約2年です。使用環境や状況により前後します。



通常のコートと比べるとレンズにキズが入りやすいので、お取り扱いにご注意ください。

「お手入れについて」をご参照ください。



水またはお湯に長時間浸けますと、くもり低減性能が低下したり、カラーレンズの場合は色抜けや色調が変化することがあります。流水での水洗いにとどめてください。



特殊なコーティングの構造上、使用状況によってレンズが変色することがあります。



超音波洗浄は1分以内を目安に、水中で揺らしながらご使用ください。